


Типичные ошибки оператора при проведении электрофореза на пленке из ацетата целлюлозы.


Передозировка сывороткой. Аппликатор забит остатками засохшей пробы. Краситель бромфеноловый синий




Кривизна дорожек. Пленка была плохо отжата фильтровальной бумагой. Не проводился префорез, участки имеют различную влажность. (Пунцовый S)

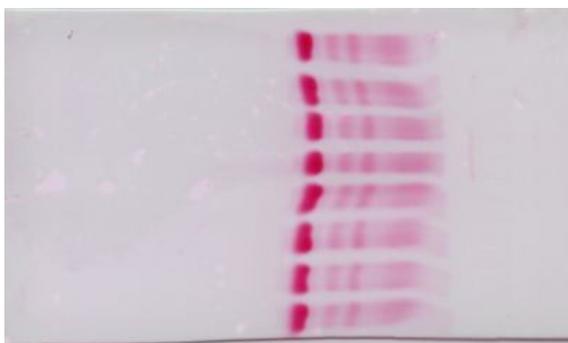

На источнике питания выставлено высокое напряжение. Буфер несбалансирован по ионной силе. Нет разделения между альбуминами и альфа-1

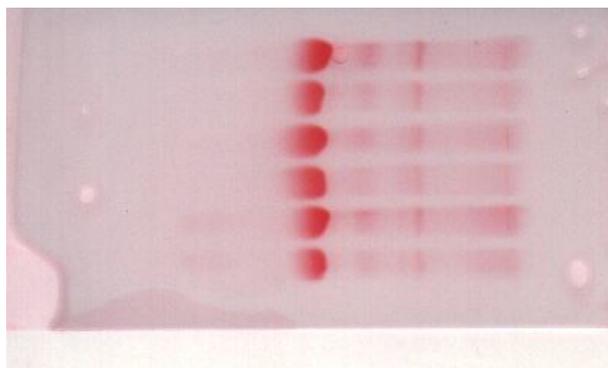


Аппликатор частично помят, частично непромыт и забит остатками пробы.

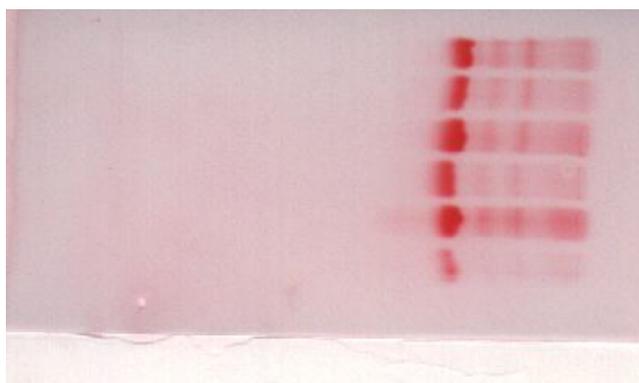

Низкое напряжение на источнике питания или старый буфер



Отмывающий раствор загрязнен, не проводился префорез

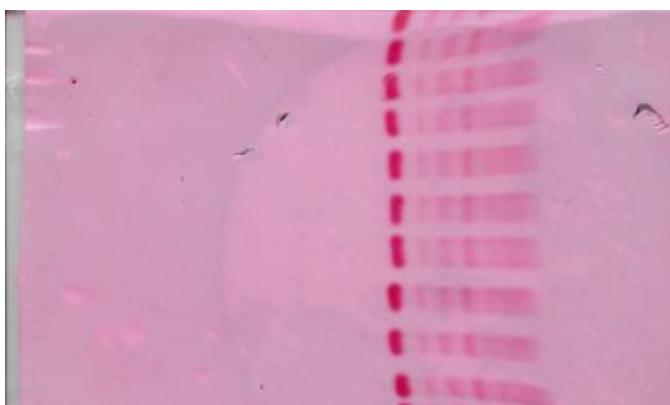

Сильный, несбалансированный по ионной силе буфер. Фракции двигаются без четкого разделения



Старый, сработавшийся буфер. Нет четкого разделения на фракции

